



AMCO : ANALISI PER LA PREVENZIONE DI PATOLOGIE DEGENERATIVE

ANALISI SU GOCCIA DI SANGUE

ISB srl e l'Associazione per la Ricerca Scientifica Emmanuele hanno creato un nuovo test che permette di valutare l'entità dello stress ossidativo mediante l'analisi di gocce di sangue depositate sulla parte assorbente di un cerotto commerciale. Questo consente di eseguire il prelievo comodamente da casa e di inviarlo ai nostri laboratori per l'analisi.

Composti determinabili

- * Fosfoetanolamina
- * Etanolamina
- * Etanolamina kinasi
- * Anticorpo etanolamina kinasi

TEMPO E COSTO DEL SERVIZIO

Tempo di consegna dei risultati : 10 gg lavorativi dalla data di arrivo dei campioni
Costo del servizio : € 40/analisi (iva inclusa)

COSTO DI SPEDIZIONE

La consegna dei campioni può essere effettuata:

1. Personalmente, presso il nostro laboratorio di Bresso (Milano), Via L. Ariosto 21; previa comunicazione telefonica.
2. Tramite il nostro corriere convenzionato al costo di € 16 a spedizione (entro 1 kg e dimensione aposs. 25x17x8 cm).
(tariffa applicata per i ritiri effettuati dal 05/11/2018).
3. Affidando direttamente la sua spedizioni ad un vostro corriere di fiducia.

Coordinate per il bonifico bancario (il pagamento del servizio è anticipato).

ISB - Ion Source & Biotechnologies s.r.l.
Banca C.R. di Asti
IBAN: IT 79 1 06085 20500 000000021229

COME RICHIEDERE IL NOSTRO SERVIZIO CORRIERE A DOMICILIO

1. Contattare ISB al numero 02/80887134 per qualsiasi chiarimento.
2. Per prenotare l'uscita del corriere, allegare, via e-mail (info@isbiolab.com) o via fax (02/700410252):
 - copia del bonifico bancario (analisi richiesto + € 16 per il servizio corriere).
 - Indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, giorno di ritiro e numero di campioni.
3. Il ritiro dei campioni sarà effettuato esclusivamente da lunedì a mercoledì.

Nota per chi spedisce i campioni senza il nostro servizio corriere

Si raccomanda di non effettuare spedizioni nei giorni di giovedì o venerdì.
Si rischierebbe che gli stessi, restino bloccati nei magazzini del corriere (sabato e domenica) e si degradino.

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO BIOLOGICO

Effettuare il campionamento di prima mattina, a digiuno.

1. Procurarsi i seguenti materiali in farmacia:

- 1 confezione di cerotti (classici)
- 1 contenitore sterile
- 1 pungidito sterile



2. Pungere il dito con il pungidito.



3. Depositare la goccia di sangue sulla parte assorbente del cerotto.

4. Utilizzare le linguette adesive del cerotto per fissarlo sulle pareti interne del contenitore.

5. Inserire il contenitore del campione ed un cerotto nuovo (stessa marca e modello a quello utilizzato) nell'apposito sacchetto di plastica sigillato (chiusura ermetica) e conservarla in frigorifero.



Nota:


- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima del campionamento.

SPEDIZIONE DEL CAMPIONE BIOLOGICO

1. Imballare il campione accuratamente in una scatola (dimensione appross. 25x17x8 cm) e usando dei pacchetti di ghiaccio sintetico ben congelato od un siberino.



SIBERINI

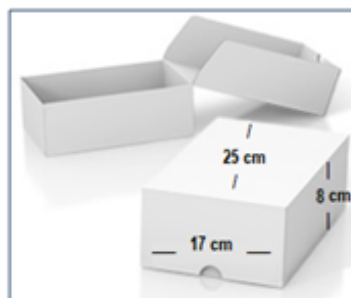

SCATOLA

(Dimensione appross. 25x17x8 cm)

2. Il modulo ISB formato consenso dati (campioni biologici), relativo al consenso informato, dovrà essere scaricato, compilato integralmente ed inserito all'interno della scatola contenente il/i campione/i.
3. Applicare sulla scatola l'etichetta contenenti i dati del mittente e destinatario.

Nel caso si richieda il nostro servizio convenzionato ((corriere a domicilio), invieremo al vostro indirizzo e-mail, l'etichetta personalizzata con la dicitura "UN3373" (simbolo identificativo dei campioni biologici di classe B).

4. Conservare la scatola in frigorifero (2° - 10°) fino all'arrivo del corriere.

CONSEGNA DEL RESULTATO DELL'ANALISI

I rapporti di prova (risultati delle analisi) saranno trasmessi via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito all'interno del modulo del consenso informato.

ISB srl

Via L. Ariosto, 21 - 20091 - Bresso (MI)
Telf. : +39.02 80887134
Fax : +39.02 700410252
E-mail : info@isbiolab.com