



AMCO : ANALISI PER LA PREVENZIONE DI PATOLOGIE DEGENERATIVE

ANALISI AMCO DISBIOSI INTESTINALE ED AMCO BASE

ISB srl e l'Associazione per la Ricerca Scientifica Emmanuele hanno sviluppato un servizio che permette di scoprire le cause dello stress ossidativo mediante l'identificazione dei batteri patogeni e dei metaboliti/tossine da loro prodotti ed iniettati nell'organismo. Le tecnologie proprietarie che consentono di ottenere detto risultato sono:

- a) **AMCO disbiosi intestinale**, studio delle alterazioni della flora batterica intestinale sulla base dei metaboliti/tossine prodotti dai batteri.
- b) **AMCO base**, studio del profilo metabolico urinario o fecale. Questa tecnica permette di rilevare la presenza di agenti tossici in grado di danneggiare l'organismo.

TEMPI E COSTI DEI SERVIZI

a) AMCO disbiosi intestinale (analisi: urine + feci)

- Tempo di consegna dei risultati : 15 gg lavorativi dalla data di arrivo dei campioni
- Costo del servizio : € 80/analisi (iva inclusa)

b) AMCO base (unico analisi: urine o feci)

- Tempo di consegna dei risultati : 15 gg lavorativi dalla data di arrivo dei campioni
- Costo del servizio : € 40/analisi (iva inclusa)

COSTO DI SPEDIZIONE

La consegna dei campioni può essere effettuata:

1. Personalmente, presso il nostro laboratorio di Bresso (Milano), Via L. Ariosto 21; previa comunicazione telefonica.
2. Tramite il nostro corriere convenzionato al costo di € 16 a spedizione (entro 1 kg e dimensione appross. 25x17x8 cm).
3. Affidando direttamente la sua spedizioni ad un vostro corriere di fiducia.

Coordinate per il bonifico bancario (il pagamento dei servizi è anticipato).

ISB - Ion Source & Biotechnologies s.r.l.
Banca C.R. di Asti
IBAN: IT 79 1 06085 20500 000000021229

COME RICHIEDERE IL NOSTRO SERVIZIO CORRIERE A DOMICILIO

1. Contattare ISB al numero 02/80887134 per qualsiasi chiarimento.
2. Per prenotare l'uscita del corriere, allegare, via e-mail (info@isbiolab.com) o via fax (02/700410252):
 - copia del bonifico bancario (analisi richiesto + € 16 per servizio corriere - facoltativo).
 - Indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, giorno di ritiro e numero di campioni.
3. Il ritiro dei campioni sarà effettuato esclusivamente da lunedì a mercoledì.

Nota per chi spedisce i campioni senza il nostro servizio corriere

Si raccomanda di non effettuare spedizioni nei giorni di giovedì o venerdì.

Si rischierebbe che gli stessi, restino bloccati nei magazzini del corriere (sabato e domenica) e si degradino.

MODALITA' DI PREPARAZIONE PREVIA AL CAMPIONAMENTO (AMCO disbiosi intestinale ed AMCO base)

Non è richiesta nessuna modalità di preparazione specifica.

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO DEL MATERIALE BIOLOGICO

Campionamento delle urine

Prelevare le prime urine del mattino, a digiuno.

1. Acquistare in farmacia una provetta sterile per urine.

E' preferibile utilizzare le provette che evitano la perdita e la fuori uscita delle urine. In più, occupano uno spazio ridotto e possono essere inviate in un'unica spedizione (nel caso di invio di vari campioni).



2. Raccogliere l'urina all'interno della provetta, prestando attenzione a non toccare l'interno della stessa o del tappo. **Non riempire la provetta al massimo**, onde evitare la fuoriuscita del liquido urinario.
3. Chiudere fermamente la provetta ed etichettarla con nome/cognome/data prelievo.
4. Inserire la provetta nell'apposito sacchetto di plastica sigillato (chiusura ermetica) e conservarla in frigorifero.

In caso si richiedano più analisi, utilizzare un sacchetto per ogni provetta.



Nota:

- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle urine.
- Il prelievo non deve essere eseguito durante il flusso mestruale.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura o di perdita del liquido urinario in essa contenuto.

Campionamento di feci

1. Acquistare in farmacia un contenitore specifico per la raccolta delle feci, provvisto di bastoncino per la raccolta del materiale solido.

E' preferibile utilizzare i contenitori che occupano uno spazio ridotto e possono essere inviate in un'unica spedizione (nel caso di invio di più campioni).



2. Svitare ed estrarre dal contenitore il tappo con il bastoncino.
3. Strisciare il bastoncino sopra le feci alcune volte in senso orizzontale e verticale.
Non riempire il contenitore al massimo, è sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
4. Inserire il bastoncino nel contenitore, chiuderlo fermamente ed etichettarlo con nome/cognome/data prelievo.
5. Inserire il contenitore nell'apposito sacchetto di plastica sigillato (chiusura ermetica) e conservarla in frigorifero.



Nota:

- *Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci.*
- *Evitare di contaminare le feci con le urine.*
- *Se si è affetti da emorroidi non eseguire il prelievo se sono sanguinanti.*
- *Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino.*

SPEDIZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI

1. Inserire in un contenitore di polistirolo: il campione sigillato ed 1 o 2 siberini (o pacchetti di ghiaccio sintetico) ben congelati e chiuderlo.

Sigillare il contenitore in modo da conservare il campione a bassa temperatura.


Imballare il tutto, accuratamente, in una scatola (dimensione appross. 25x17x8 cm).



SCATOLA POLISTIROLO



SIBERINI

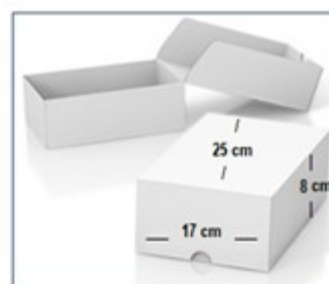

SCATOLA

(Dimensione appross. 25x17x8 cm)

2. Il modulo Scheda Informativa e Dichiarazione di Consenso al Trattamento dei Dati Personali e Sensibili, dovrà essere scaricato, compilato integralmente ed inserito all'interno della scatola contenente il/i campione/i.

- ISB_formato consenso dati (persone naturali)

3. Applicare sulla scatola l'etichetta contenenti i dati del mittente e destinatario.

Nel caso si richieda il nostro servizio convenzionato (corriere a domicilio), invieremo al vostro indirizzo e-mail, l'etichetta personalizzata con la dicitura "UN3373" (simbolo identificativo dei campioni biologici di classe B).

4. Conservare la scatola in frigorifero (2° - 10°) fino all'arrivo del corriere.

CONSEGNA DEI RISULTATI DELLE ANALISI

I rapporti di prova (risultati delle analisi) saranno trasmessi via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito all'interno del modulo del consenso informato.

ISB Srl.

Via L. Ariosto, 21 - 20091 - Bresso (MI)

Tel. : +39.02 80887134

Fax : +39.02 700410252

E-mail : info@isbiolab.com